



Instruções de uso

Obrigado por escolher a Elvie
- estamos entusiasmados por estar aqui.

É nossa missão criar produtos que melhorem a vida das mulheres,
por isso esperamos que o **Elvie Curve** faça a diferença na sua.

Para detalhes de contato do serviço ao cliente, visite [elvie.com](https://www.elvie.com)

Como cuidar do Elvie Curve

Desmonte o Elvie Curve antes de limpar ou esterilizar.

Esterilização (antes do primeiro uso e subsequentemente uma vez por dia):

Esterilize as peças em água a ferver por cinco minutos.

OU esterilização em micro-ondas, vapor e métodos de esterilização em água fria.

Limpeza (após cada uso):

Lave as peças com água limpa e sabão. Enxágue bem.



OU Coloque na prateleira superior do lava-louças.

O Elvie Curve deve ser armazenado limpo, seco e completamente montado.

Usar o Elvie Curve

Iniciar uma sessão:

1. Insira a bolsa no suporte.
2. Coloque o mamilo no centro do orifício para o mamilo, de modo que se sinta confortável e não pressione contra o interior da bolsa.
3. Pressione a bolsa para criar sucção. Se a sucção gerada for desconfortável, pressione suavemente a válvula para abri-la e libertar a pressão.
4. Verifique se o mamilo ainda está centralizado.
5. Coloque e puxe o sutiã de amamentação sobre o Elvie Curve. Mantenha-o firmemente pressionado contra o peito sem deixar espaços.
6. Se sentir que a sucção está a diminuir, pressione novamente a bolsa para manter a sucção e manter o fluxo de leite. Pode fazer isso através do seu sutiã. Pode ser necessário fazer isso a cada dois minutos - Vai aprender o que funciona melhor para si!
7. Certifique-se que presta atenção ao nível de leite para garantir que não transborda.

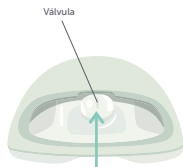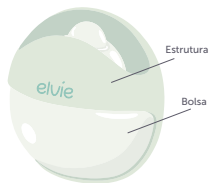

Terminar a sua sessão:

1. Pressione a válvula para abri-la e libertar a pressão, em seguida, use o dedo para quebrar a vedação ao redor do mamilo.
2. Coloque o Elvie Curve de barriga para baixo enquanto se prepara para decantar o leite.
3. Elvie Curve não é projetado para armazenar leite. Despeje o leite através do Orifício do Mamilo conforme mostrado para esvaziar o leite da Bolsa e da Válvula.

Por favor, note: Leite coletado por longos períodos e deixado em temperatura ambiente por muito tempo não deve ser dado ao seu bebê.



Segurança e Garantia vie Curve

Indicações de Uso:

O Elvie Curve é uma bomba de mama não elétrica para ser usada por mulheres lactantes para extrair e coletar leite de seus seios. O 'Elvie Curve' destina-se a um único usuário.

Materiais:

Bolsa: Silicone, Estrutura: Polipropileno

Segurança e Advertências:

- Inspeccione os danos antes da primeira utilização e após cada utilização.
- Não armazene as peças molhadas ou húmidas, pois pode desenvolver-se bolor.
- Não deixe cair nem insira nenhum objeto estranho em qualquer abertura do dispositivo.
- Se a embalagem parecer danificada ou violada antes da utilização, não utilize e entre em contacto com a nossa equipa de apoio ao cliente.

- Mantenha o Elvie Curve afastado de fontes de calor e não o exponha a chamas abertas ou calor excessivo.
- O Elvie Curve não deve ser usado se estiver deitada, se estiver a fazer exercício intenso ou durante atividades com risco de ferimentos.
- Não use o Elvie Curve quando não estiver a bombear ativamente com o produto.
- Não use o Elvie Curve enquanto estiver a conduzir ou a operar máquinas pesadas.
- Não bombeie até depois de dar à luz, pois a bombagem do leite materno pode induzir o parto.
- Use o Elvie Curve apenas para o seu uso pretendido, conforme descrito neste manual.

Garantia

O Elvie Curve é coberto por uma garantia limitada voluntária do fabricante contra quaisquer defeitos em materiais e/ou manufatura, quando usado de acordo com as instruções do produto: por 90 dias a partir da data da compra original ("Período de Garantia"). Esta garantia é fornecida gratuitamente e é separada de quaisquer direitos fornecidos pelas leis ou regulamentos do consumidor no país de compra. Ela não exclui, limita ou afeta quaisquer direitos do consumidor ou reivindicações legais decorrentes das leis nacionais sobre a venda de produtos de consumo. Esta garantia é regida e construída sob as leis no qual a compra do produto ocorreu. Esta garantia não cobre deterioração cosmética, danos causados por desgaste geral, destruição física ou natural, acidente, uso indevido, modificação, negligência ou outras causas externas. Este é um produto para uso individual. O uso por mais de uma pessoa pode apresentar um risco à saúde e anula a garantia. A garantia não cobre compras de revendedores não autorizados. Quaisquer reclamações de garantia devem ser apoiadas por evidências razoáveis, incluindo prova da data de compra, juntamente com estas condições de garantia. Se você encontrar um problema ou identificar quaisquer defeitos com o seu Elvie Curve dentro do Período de Garantia, notifique a Chiaro Technology Limited ("Chiaro") em questions@elvie.com. A Chiaro reserva-se o direito de investigar a causa do defeito e pode exercer seu critério ao determinar se substituirá ou não o Produto ou quaisquer partes relevantes gratuitamente. No caso de a Chiaro decidir fornecer uma substituição, qualquer substituição não estenderá a vida desta garantia.

A única responsabilidade da Chiaro por qualquer violação desta garantia limitada é limitada à substituição de qualquer produto que não cumpra com a garantia anterior.

Por favor, guarde o seu comprovante de compra no caso de precisar contatar o atendimento ao cliente da Elvie para serviços de garantia.

Etiquetas



Segurança Alimentar



Símbolo de Reciclagem



Consultar instruções de uso



Fabricante



Data de fabricação



Número do Lote

Fabricado e Distribuído por Chiaro Technology Limited

Número do modelo: EC01

Número do documento: AW-000436-C

elvie.com

