



Instruções de uso

Obrigado por escolher a Elvie
- estamos entusiasmados por estar aqui.

É nossa missão criar produtos que melhorem a vida das mulheres,
por isso esperamos que o **Elvie Catch** faça a diferença na sua.

Para detalhes de contato com o atendimento ao cliente, visite [elvie.com](https://www.elvie.com)

Manutenção do Elvie Catch

Desmonte o Elvie Catch antes de limpar ou esterilizar.

Esterilização (antes do primeiro uso e subsequentemente uma vez por dia):

Esterilize as peças em água fervente por cinco minutos.

OU microondas, a vapor ou usando métodos de esterelização em água fria.

Limpeza (após cada uso):

Lave com água limpa e sabão. Enxágue completamente.


OU Coloque na prateleira superior da máquina de lavar-louça.

Elvie Catch deve ser armazenado limpo, seco e totalmente montado.

Usando o Elvie Catch

1. Empurre o Copo no sulco da Saia. Certifique-se de que está completamente encaixado em todos os lugares.
2. Coloque o Elvie Catch no seu sutiã, para que fique firmemente no lugar. Para melhor conforto e ajuste, recomendamos usar o Elvie Catch com um sutiã de amamentação.
3. Centre o seu mamilo no Orifício para Mamilo.
4. Certifique-se de verificar regularmente o nível de leite, para garantir que não transborde. Não permita que o nível de leite ultrapasse a parte inferior do Orifício para Mamilo.
5. Recomendamos remover o Elvie Catch a cada duas a três horas, para permitir que o mamilo seque completamente ao ar. Ao remover, pode ser útil inclinar-se ligeiramente para a frente.
6. O Elvie Catch não foi projetado para armazenar leite. Despeje o leite através do topo do Orifício para Mamilo conforme mostrado na ilustração.

Por favor, note: Leite coletado durante períodos prolongados e deixado em temperatura ambiente por muito tempo não deve ser dado ao seu bebê.

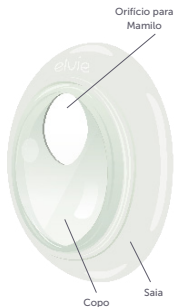

Segurança e Garantia

Uso Previsto:

Elvie Catch destina-se a ser utilizado por mulheres lactantes para coletar o leite vazado durante e entre as mamadas, quando há fluxo de leite não intencional do peito.

Materiais:

Saia: Silicone, Copo: Polipropileno

Segurança e Advertências:

- Inspecionar quanto a danos antes do primeiro uso e após cada uso.
- Não armazenar partes molhadas ou húmidas, pois pode gerar bolores e mofo.
- Não deixar cair ou inserir nenhum objeto estranho em nenhuma abertura do dispositivo.
- Se a embalagem parecer danificada ou violada antes do uso, não utilizar e entrar em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente.
- Manter o Elvie Catch longe de calor excessivo e chamas abertas.
- Não utilizar o Elvie Catch por mais de três horas.
- Utilizar o Elvie Catch apenas para o fim pretendido, conforme descrito neste manual.

Garantia

O Elvie Catch é coberto por uma garantia limitada voluntária do fabricante contra quaisquer defeitos de materiais e/ou mão de obra, quando usado de acordo com as instruções do produto: por 90 dias a partir da data de compra original ("Período de Garantia"). Esta garantia é fornecida gratuitamente e é independente de quaisquer direitos fornecidos pelas leis ou regulamentos de consumidores no país de compra. Não exclui, limita ou afeta quaisquer direitos do consumidor ou reivindicações legais decorrentes das leis nacionais sobre a venda de produtos de consumo. Esta garantia é regida e construída pelas leis do país em que a compra do produto foi realizada. Esta garantia não cobre deterioração cosmética, danos causados por desgaste geral, destruição física ou natural, acidentes, uso indevido, modificações, negligência ou outras causas externas. Este é um produto para uso individual. O uso por mais de uma pessoa pode representar um risco à saúde e invalida a garantia. A garantia não cobre compras de revendedores não autorizados. Quaisquer reclamações de garantia devem ser apoiadas por evidências razoáveis, incluindo comprovante de data de compra, juntamente com estas condições de garantia. Se tiver algum problema ou identificar quaisquer defeitos com o seu Elvie Catch dentro do Período de Garantia, notifique a Chiaro Technology Limited ("Chiaro") em questions@elvie.com. A Chiaro reserva-se o direito de investigar a causa do defeito e pode exercer o seu critério na determinação de substituir ou não o Produto ou quaisquer peças relevantes gratuitamente. No caso de a Chiaro decidir fornecer uma substituição, qualquer substituição não estenderá a vida desta garantia.

A responsabilidade única e exclusiva da Chiaro por qualquer violação desta garantia limitada é limitada à substituição de qualquer produto que não cumpra a garantia mencionada anteriormente. Por favor, mantenha o seu comprovante de compra no caso de precisar entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Elvie para serviços de garantia.

Etiquetas



Segurança Alimentar



Símbolo de Reciclagem



Consultar instruções de uso



Fabricante



Data de fabricação



Número do Lote

elvie.com

